

Serynox - Kurzanleitung



- **Beachten Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung (Kurzanleitung).**
- **Achten Sie auf Sauberkeit und Hygiene.**
- **Halten Sie das System frei von Körperpflegemittel und Ölen.**
- **Während der Nutzung sind Rauchen und offenes Feuer verboten.**

- A. Verwenden Sie Serynox nur mit folgendem Zubehör:
- entweder mit einem flexiblen Schlauch, der an den Schlauchanschluss (3) für die konstante Beatmung angeschlossen ist, oder
 - mit einem medizinischen Gerät mit einem spezifischen Anschluss für Serynox (Lachgas 50 % / Sauerstoff 50 %) gemäss der Norm SS 8752430 (NORDIC) an die Schnellkupplung (bedarfsgesteuertes Ventil (6)).



Die Anschlüsse 3 und 6 dürfen nicht gleichzeitig verwendet werden!

- B. Überprüfen Sie den Restdruck (1) in der Flasche.
Der Zeiger muss sich ausserhalb des roten Bereichs befinden.
- C. Vergewissern Sie sich, dass der Durchflussregler (2) in Stellung „0“ ist.



Stellen sie vor dem Anschluss von Zubehör sicher,
dass keine Verbindung zum Patienten besteht!

- D. Schliessen Sie das Zubehör an den richtigen Ausgang an:
- (3) für einem flexiblen Schlauch, oder
 - (6) für ein bedarfsgesteuertes Ventil.



Überprüfen sie vor dem Anschluss eines Zubehöerteils oder medizinischen Gerätes stets, ob diese mit den Leistungsdaten des Ventils kompatibel sind!

- E. Öffnen Sie das Ventil (5): Position „ON“.



Ein zu schnelles Öffnen des Ventils (5) kann zu Feuer- und Explosionsgefahr führen. Ein unzureichendes Öffnen des Absperrventils kann zu einer zu geringen Gasabgabe führen!

- F. Bei Verwendung eines flexiblen Schlauchs für konstante Beatmung (3) den Durchflussregler (2) auf den vorgeschriebenen Durchfluss (Liter / Minute) einstellen.



Stellen Sie stets sicher, dass der Durchflussregler einrastet und sich nicht zwischen zwei Einstellungen befindet! Befindet sich der Durchflussregler zwischen zwei Einstellungen, wird das medizinische Gas nicht in der korrekten Menge abgegeben!

- G. Bei Verwendung des bedarfsgesteuerten Ventils (6) löst die Atmung des Patienten die Gasabgabe aus.



Stellen Sie sicher, dass der Durchflussregler (2) sich Position „0“ befindet!

- H. Nach dem Gebrauch:
Schliessen Sie das Ventil (5): Position „OFF“. Den Durchflussregler (2) in die Stellung „0“ bringen. Druck entlasten und Zubehör entfernen.



Öffnen Sie nicht die Schutzklappe vom Füllanschluss (4)!
Dieser Anschluss dient nur zur Befüllung im Füllwerk!

Link zum Sicherheitsdatenblatt



Weitere Informationen

Gerne erhalten Sie von unserem Aussendienst weitere Informationen zu Serynox.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage von Messer Schweiz.



Messer Schweiz AG
Seonerstrasse 75
5600 Lenzburg
Telefon 062 886 41 41
info@messer.ch
www.messer.ch